

Actimove® Solea

Zapato postoperatorio ECO



NO CONTIENE LÁTEX

Zapato postoperatorio ECO

Suela sintética y cobertura del pie transpirable. Sistema de cierre tipo "Velcro".

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Sistema de cierre tipo "Velcro"**: facilita su colocación y ajuste
- **Anchura** que permite la aplicación de vendajes voluminosos y apósitos
- **Suela antideslizante** que proporciona una superficie segura para la movilidad del paciente
- **Suela sólida** que reduce el grado de flexión del pie y de los dedos
- **Ambidextro**: menor complicación administrativa y reducción de stocks

INDICACIONES

Después de cirugía en el pie o los dedos.

FUNCIÓN

Protección para el pie y los dedos. Proporciona una movilidad normal.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Abrir las tiras. Colocar el pie dentro de la envoltura y fijar las tiras por encima del pie.
2. La longitud de las tiras puede ajustarse, cortándolas.

Cuidado y Limpieza

El zapato se puede limpiar con un paño húmedo. Dejarlo secar antes de volver a utilizar.

CLASE CE

I, no estéril

EMBALAJE

Envase individual. Bolsa de plástico con folleto de instrucciones en su interior.

ALMACENAJE

Mantenerlo lejos de la luz, la humedad y a una temperatura inferior a 25°C.

CADUCIDAD

Las características intrínsecas del producto no se alteran con el tiempo.

FABRICANTE

BSN Medical Ltd.
Brierfield BB9 5NJ
England
www.bsnmedical.com

Distribuido por:

Smith & Nephew, S.A.

División BSN/Rehab
Fructuós Gelabert, 2-4
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. Atención Cliente:
93 373 73 14; 93 373 71 14
93 373 74 14; 93 373 71 65
Fax. Atención Cliente:
93 373 72 65; 93 373 76 03
ESSMITH1@ATTGLOBAL.NET

